


Criterios de Elección

Según:

- La morfología: Talla pequeña, mediana y grande (T1,T2,T3).
- Grado de incontinencia o periodo entre cambios: DIA, NOCHE SUPERNOCHE.
- Estado cognitivo y movilidad: anatómicos o elásticos.

Colocación

- Verificar que las barreras antifugas están levantadas y el absorbente adquiere forma de cuenco.
- Situar la parte redondeada posterior del tampón en el pliegue nalga-muslo.
- Los elásticos en la entrepierna no deben quedar tensos, pero si ajustados en el pliegue inguinal.

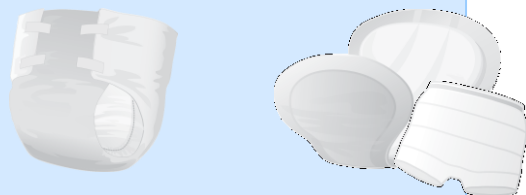

Sujeción

- Anatómicos o dos piezas, usar siempre la malla de sujeción.


- Elásticos:
 - ajustar primero los adhesivos inferiores horizontalmente.
 - Ajustar los superiores al bies y hacia fuera.
 - Para reposicionar sujetar la lengüeta azul y tirar de la blanca.

Utilización


- Cada absorbente tiene una capacidad de absorción que debemos adecuar a las necesidades del paciente.
- El marcaje central del absorbente (testigo de humedad) se diluye al contacto con la orina y nos indica el grado de saturación del mismo.

Retirada


- Retirar siempre desde delante hacia atrás para prevenir infecciones.
- Realizar una higiene adecuada.

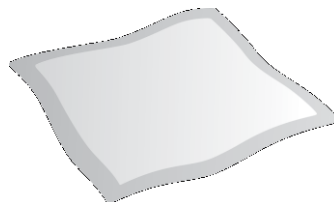

Cómo deben colocarse los absorbentes anatómicos

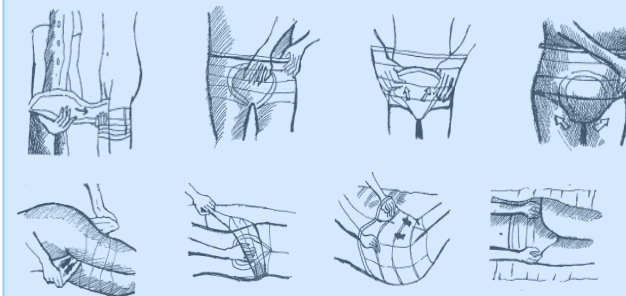

Cómo deben colocarse los absorbentes Elásticos

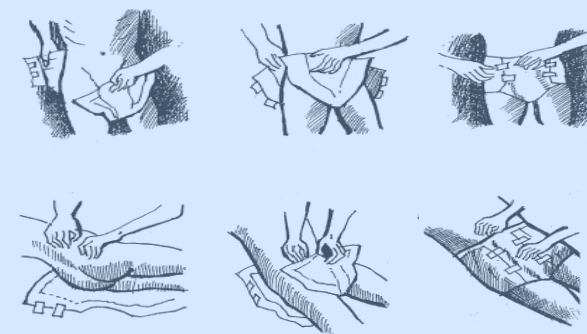

Debemos evitar

- Que el polietileno entre en contacto con la piel.
- Superponer dos absorbentes: aumenta el riesgo de fuga y es incomodo para el paciente.